


# Gebrauchsanweisung Deutsch

## E-Safe Zubehör


### Movix Haftadapter




### E-Tray Sprizentablett

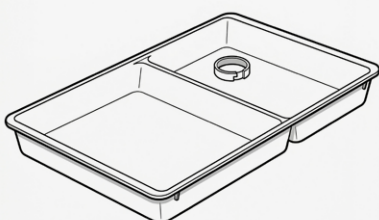

### Wandhalter

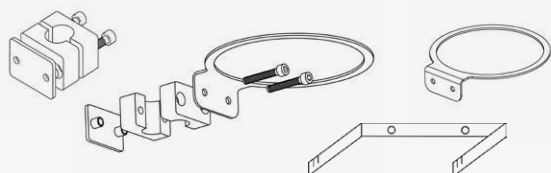

### Autoklavsieb

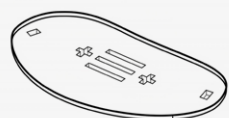

## Movix Haftadapter

für Behälter

0.5 l - 0.6 l

Art. Nr. CH: 1154


Art. Nr. EU: 46002

für Behälter

0.5 l - 3.1 l

Art. Nr. CH: 1155

Art. Nr. EU: 46003

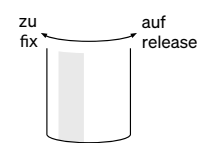


Der Adapter mit latexfreiem Haftgummi sorgt für sicheren Stand der E-Safe Behälter an wechselnden Einsatzorten.


Der Movix wird am Boden der E-Safe Behälter im Uhrzeigersinn festgedreht.



Der Adapter sichert beim Abstellen auf eine vorgereinigte glatte Fläche die Behälter beim Verwenden gegen ungewolltes Umfallen.

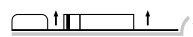

**Entfernen des Adapters:** Der Haftgummi lässt sich vom Untergrund wieder ablösen, wenn der schwarze Pin nach vorne gedrückt wird.

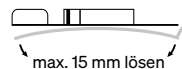

**Haftungsbeeinträchtigung:** Sollte die Haftung nachlassen, bitte die Gummifolie nur am Rand leicht nach unten drücken und evtl. zur Entfernung von Schmutzpartikel unter klarem Wasser abspülen. Danach ist die Haftwirkung wieder hergestellt.


**Haftungsverstärkung:** Zum Abdrehen der Insulinpens ist die Behälterfixierung auf dem E-Tray Tablett stabiler. Wenn der E-Safe Behälter auf einen, auf einer Fläche liegenden, Movix aufgedreht wird (dazu die Griffe halten), erhöht sich die Haftwirkung. Zum Entfernen des Movix muss zuerst der Behälter abgedreht werden, bevor dieser über den Pin gelöst werden kann.

## Hinweis

Gegenüber Darstellungen und Angaben in dieser Gebrauchsanweisung sind technische Änderungen, die zur Verbesserung der Produkte notwendig sind, vorbehalten.


## Gebrauchsanweisung Deutsch E-Safe Zubehör

### E-Tray Sprizentablett

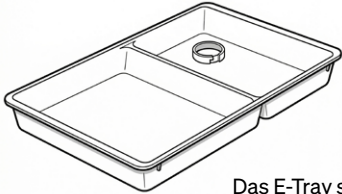


Das E-Tray sichert die E-Safe Behälter gegen Umfallen. Das Tablett ist überall einsatzbereit. Die Behälter werden auf dem Bajonettverschluss fixiert. Über den Mittelsteg kann das Tablett in eine reine und unreine Seite unterteilt werden.


Reinigung mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln; bei hartnäckiger Verschmutzung 80% ige Alkohollösung verwenden.

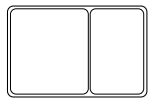

ohne Bajonettverschluss  
Art. Nr. CH: 1158  
Art. Nr. EU: 45000

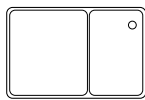


für kleine Behälter  
0.5 l - 0.6 l  
Art. Nr. CH: 1152.KL.  
Art. Nr. EU: 45041

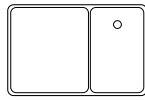

für kleine und grosse  
Behälter 0.5 l - 3.1 l  
Art. Nr. CH: 1152  
Art. Nr. EU: 45101

### Wandhalter

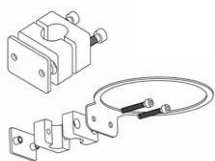

**Adapter** für Befestigung am Infusionsständer

Rohr Ø 20 mm  
Art. Nr. CH: 1387  
Art. Nr. EU: 45020


Rohr Ø 25 mm  
Art. Nr. CH: 1388  
Art. Nr. EU: 45025



**Halter** für Behälter zur Befestigung an Wand, Wagen oder Adapter

für Behälter  
0.5 l - 0.6 l  
Art. Nr. CH: 1149  
Art. Nr. EU: 45005


für Behälter  
1.6 l - 3.1 l  
Art. Nr. CH: 1150  
Art. Nr. EU: 45010

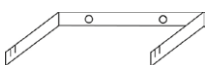


**E-Safe Wandhalter** nur für 7.1 Liter Behälter zur Befestigung an Wand oder Wagen

Art. Nr. CH: 1157  
Art. Nr. EU: 45030


### Autoklavsieb für E-Safe Spezial Behälter\*

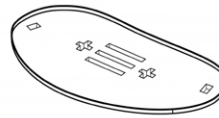


Art. Nr. CH: 1156  
Art. Nr. EU: 45009

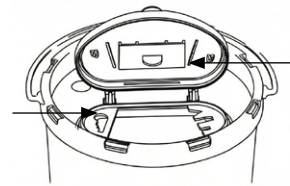

Im Abwurfdeckel wird über Klemmnasen das Autoklavsieb während der Verwendung sicher aufbewahrt.

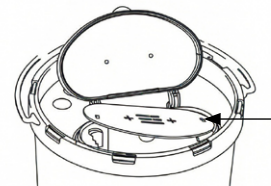

Falls der Behälterinhalt autoklaviert werden soll, wird das Sieb am Griff aus dem kleinen Deckel genommen und unter Reihenfolge (1) und (2) auf die Öffnung gedrückt, bis das Sieb einrastet.

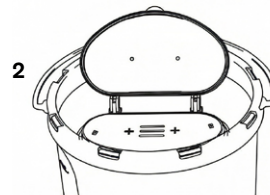

Obwohl durch das Sieb keine Kanülen heraustreten können, sollte zum Transport der Tagesverschluss am Behälter – zur zusätzlichen Sicherheit – leicht aufgedrückt werden. Der Tagesverschluss muss bei der Autoklavierung geöffnet werden.

\*Das Autoklavsieb kann nur im E-Safe Spezial Behälter eingesetzt werden.



**Verwendungszweck:** Das Autoklavsieb ermöglicht die Sterilisation befüllter Entsorgungsbehälter. Durch das Anbringen des Autoklavsiebes wird verhindert, dass beim Transport oder bei der Sterilisation der Inhalt durch Umfallen des Behälters herausfallen kann und somit Stichverletzungen entstehen. Beim Sterilisationsvorgang ist durch das Autoklavsieb sichergestellt, dass der Inhalt mit Wasserdampf durchdrungen werden kann und es dadurch nicht zu einer Beschädigung des Behälters kommt. Der Deckel muss nach der Sterilisation verschlossen werden. Das Sieb muss dazu nicht entfernt werden. **Nur mit Autoklavsieb autoklavieren (Temperatur 134°C)!** Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht **Verletzungsgefahr!**

