


Mode d'emploi en français Accessoires E-Safe


Adaptateur adhésif Movix




Plateau pour seringues E-Tray

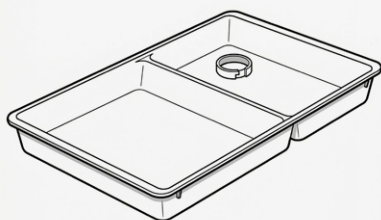

support mural

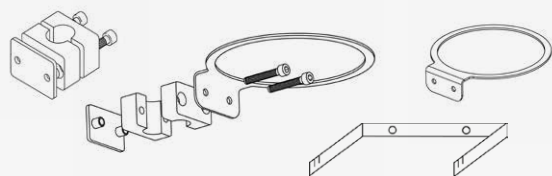

Tamis pour autoclave

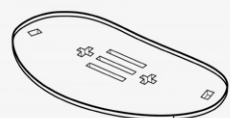


Adaptateur adhésif Movix

pour conteneurs
0.5 l - 0.6 l
Réf. CH: 1154
Réf. UE: 46002

pour conteneurs
0.5 l - 3.1 l
Réf. CH: 1155
Réf. UE: 46003





fixer tourner

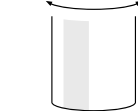

L'adaptateur avec caoutchouc adhésif sans latex garantit la stabilité des conteneurs E-Safe sur différents lieux d'utilisation.

Le Movix se visse dans le sens des aiguilles d'une montre au fond des conteneurs E-Safe.

Lorsqu'il est posé sur une surface lisse préalablement nettoyée, l'adaptateur empêche les récipients de se renverser accidentellement pendant leur utilisation.

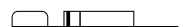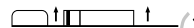

max. 15 mm desserrer

Retrait de l'adaptateur : le caoutchouc adhésif peut être retiré de la surface en appuyant sur la broche noire vers l'avant.

Diminution de l'adhérence : si l'adhérence diminue, appuyez légèrement sur le film en caoutchouc uniquement sur les bords et rincez éventuellement à l'eau claire pour éliminer les particules de saleté. L'adhérence est alors rétablie.


Renforcement de l'adhérence : pour dévisser les stylos à insuline, la fixation du conteneur sur le plateau E-Tray est plus stable. Si le conteneur E-Safe est vissé sur un Movix posé à plat (en tenant les poignées), l'adhérence est renforcée. Pour retirer le Movix, il faut d'abord dévisser le récipient avant de pouvoir le détacher de la broche.

Remarque

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques nécessaires à l'amélioration des produits, par rapport aux descriptions et indications figurant dans ce mode d'emploi.

Mode d'emploi en français Accessoires E-Safe

Plateau pour seringues E-Tray

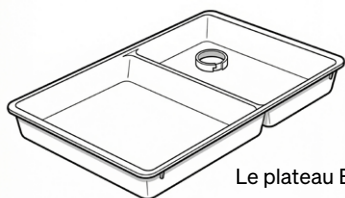

Le plateau E-Tray empêche les conteneurs E-Safe de se renverser. Le plateau peut être utilisé partout. Les conteneurs sont fixés à l'aide d'un système de fermeture à baïonnette. La barre centrale permet de diviser le plateau en deux parties : une partie propre et une partie sale.

Nettoyage avec des désinfectants disponibles dans le commerce ; en cas de salissures tenaces, utiliser une solution alcoolique à 80 %.




sans fermeture à baïonnette

Réf. CH: 1158
Réf. UE: 45000



pour petits récipients
0.5 l - 0.6 l


Réf. CH: 1152.KL.
Réf. UE: 45041

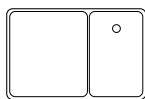

pour petits et grands récipients
0.5 l - 3.1 l

Réf. CH: 1152
Réf. UE: 45101

support mural

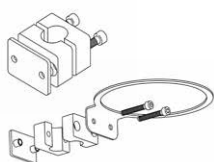

Adaptateur

pour fixation sur pied à perfusion

tube Ø 20 mm

Réf. CH: 1387

Réf. UE: 45020

tube Ø 25 mm

Réf. CH: 1388

Réf. UE: 45025



Support pour récipients

Fixation au mur, au chariot ou à l'adaptateur

pour conteneurs

0.5 l - 0.6 l

Réf. CH: 1149


Réf. UE: 45005

pour conteneurs

1.6 l - 3.1 l

Réf. CH: 1150

Réf. UE: 45010

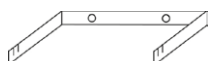


Support mural E-Safe uniquement pour récipients de 7.1 litres, à fixer au mur ou sur un chariot

Réf. CH: 1157


Réf. UE: 45030

Tamis pour autoclave pour récipient spécial E-Safe*

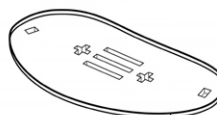


Réf. CH: 1156


Réf. UE: 45009

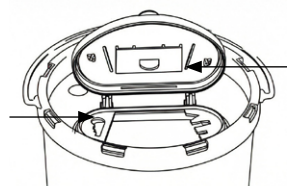

Le tamis de l'autoclave est rangé en toute sécurité dans le couvercle à l'aide de languettes de fixation pendant l'utilisation.

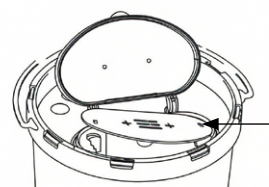

Si le contenu du récipient doit être autoclavé, retirer le tamis du petit couvercle à l'aide de la poignée et le presser sur l'ouverture conformément aux étapes (1) et (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

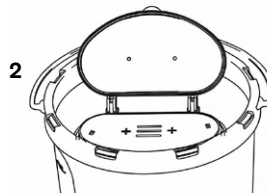

Même si aucune canule ne peut sortir à travers le tamis, il convient, pour plus de sécurité, d'appuyer légèrement sur le bouchon journalier du récipient avant le transport. Le bouchon journalier doit être ouvert lors de l'autoclavage.

*Le tamis pour autoclave ne peut être utilisé que dans le récipient spécial E-Safe.



Utilisation prévue : le tamis pour autoclave permet la

stérilisation de conteneurs de déchets remplis. La mise en place du tamis pour autoclave empêche le contenu de se renverser pendant le transport ou la stérilisation et d'entraîner ainsi des blessures par perforation. Lors du processus de stérilisation, le tamis pour autoclave garantit que le contenu peut être imprégné de vapeur d'eau sans endommager le conteneur. Le couvercle doit être fermé après la stérilisation. Il n'est pas nécessaire de retirer le tamis pour cela. **Stériliser uniquement avec le tamis pour autoclave (température 134 °C) !** Une utilisation inappropriée peut entraîner un **risque de blessure !**

